

Reinigung der Vorschaltkammer

1. Bei regelmässiger Anwendung sollte die Vorschaltkammer 1x wöchentlich gereinigt werden.
2. Zerlege die Vorschaltkammer und spüle die Teile und Maske in warmem Wasser mit etwas Abwaschmittel.
3. Nimm die gereinigten Teile aus dem Spülwasser ohne diese abzuspülen oder mit einem Tuch zu trocknen. Lasse sie über Nacht selbst trocknen. Der dünne Seifenfilm verhindert so die elektrostatische Ladung bei Vorschaltkammern aus Kunststoff während einer Woche.