

Bitte leer lassen

Laborauftrag T-SPOT TB®

(gamma-Interferon Tuberkulose Test)

Auftraggeber / Arzt

Name:

Adresse:

Tel.Nr.:

Fax.Nr.:

Patient

Name:

Vorname:

Geburtsdatum

Geschlecht: m w

Strasse, Nummer:

PLZ, Ort:

Ambulant

Stationär

Krankenkasse:

Rechnung an:

Entnahmedatum und Zeit:

- Klinische Angaben**
- TB Kontakt (Umgebungsuntersuchung) vor Immunsuppression
- Verdacht auf TB Tuberkulinprobe (Mantoux) pos neg fehlt

- Empfehlungen und Instruktionen für Blutentnahme, Lagerung und Versand**
1. Das Blut kann am Vortag (Mittwoch) frühestens ab 08.00 abgenommen werden und muss am Donnerstag bis spätestens um 12.00h im Labor sein.
 2. Erwachsene und Kinder ≥ 10 Jahre: 7.5ml Nativblut in ein Lithium-Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** entnehmen.
 Kinder 2-9 Jahre: 7.5 ml Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** zur Hälfte füllen
 Kinder 0-2 Jahre: 7.5 ml Heparinröhrchen **ohne Glasgranulat** mit 2 ml Blut füllen
 3. Nicht stark stauen und eine dicke Nadel (≤21G) verwenden.
 4. Das Röhrchen exakt füllen.
 5. Röhrchen zur Mischung des Blutes **sofort 8-10 Mal sorgfältig kippen.**
 6. Datum und Uhrzeit der Entnahme auf dem Röhrchen und auf dem Auftragsformular notieren.
 7. Sofortiger Versand ins Labor (externe Post: Express)
 8. Aufbewahrung bei Zimmertemperatur (18-22°C), nicht zentrifugieren, kühlen oder gefrieren.
 9. Die Analysen werden, ausser vor Fest- und Feiertagen, jeden **Donnerstag** durchgeführt.
 10. Dauer der Analyse: 2 Tage
 11. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne unter der Tel. Nr. 052 266 46 66 zur Verfügung.